





Quick Guide - GLS5.1 Aktiv personløfter

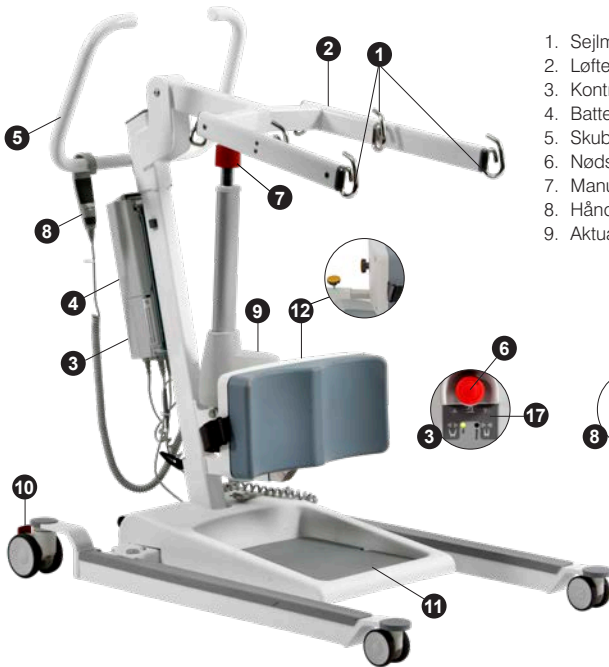

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Sejlmonteringskroge | 10. Bremse/udløser |
| 2. Løftearm | 11. Fodplade |
| 3. Kontrolboks | 12. Knæpude & justeringshåndtag x 2 |
| 4. Batteri | 13. Batteri indikator |
| 5. Skubbehåndtag | 14. Service indikator |
| 6. Nødstop | 15. Løftearm - op/ned |
| 7. Manuel nødфир | 16. Breddeindstilling |
| 8. Håndbetjening | 17. Nødbetjening - op/ned og breddeindstilling |
| 9. Aktuator | |

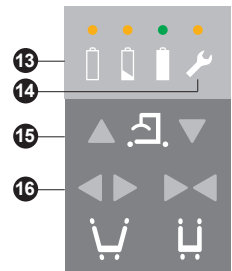

Tjekliste før brug

- Kontroller at personløfteren kører frit.
- Tjek at bremsefunktionen (10) på hjulene virker.
- Kontroller at løftearmen (2) kan hæves og sænkes ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at breddeindstillingen (16) kan justeres (åbnes/lukkes) ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at nødbetjeningsfunktionerne (17) på kontrolboksen (3) virker. Kontroller det manuelle nødфир (7) ved at dreje det i pilens retning .
- Tjek at nødstopknappen virker (6). Du tænder for personløfteren igen ved at dreje nødstopknappen i pilens retning, indtil knappen "springer op".

- Løs knæpudens gule justeringshåndtag x 2 (12). Puden kan nu justeres op/ned og in eller ud. Stram de gule håndtag igen for at låse knæpuden i den nye position.
- Sørg for, at fodpladen (11) er sikker og ren.

Opladningsmuligheder

- Integreret oplader i kontrolboks - forbind kabel til stikkontakt.
- Når kablet er forbundet til en tændt stikkontakt, vil den grønne diode på kontrolboksen (3) lyse.
- Den grønne og gule diode på kontrolboksen (3) vil lyse når batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet vil den gule diode slukke.



Indikatorlamper og lydsignaler

| Status | Indikatorlamper | Lydsignaler | Mulige GLS5.1-signaler | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----|--------------|-----------|
| | | | Op | Ned | Benjustering | Nødfiring |
| Håndbetjening | | | | | | |
| Alt OK | Grøn | | x | x | x | x |
| Lavt batteriniveau | Gul | | x | x | x | x |
| Kritisk lavt batteriniveau | Gul | Bipper ved aktivering af knap | x | x | x | x |
| Service på personløfter | Lyser konstant under brug samt i 2 minutter efter | | x | x | x | x |
| Overbelastning | Blinker gult 3 gange + lyser i 10 sek | | | x | | x |
| Kontrolboks | | | | | | |
| Oplader | Grøn + gul | | | | | |
| Opladet | Grøn | | | | | |

Tilbehør


Sejlmonteringskroge

Det er muligt at anvende de yderste eller de inderste sejlmonteringskroge. (En risikovurdering SKAL finde sted inden et løft foretages.)

Sejlstropperne placeres i krogene. Ved løft tjek at løftestropen forbliver i den korrekte position i løftebjøjlens krog.

Løftesejl

Vi anbefaler, at man kun anvender sejl beregnet for GLS5.1. Løftesejlet skal tjekkes før brug - (se løftesejlets brugervejledning). Løftesejlets label skal være intakt og læsbar.

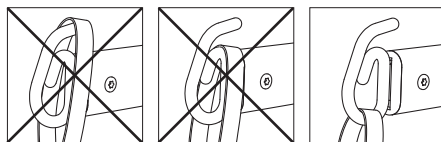

Daglig rengøring og vedligeholdelse

Rengøring skal foregå med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes stærke syrer, baser eller alkohol til rengøring. Se evt. brugermanual.



Scan her for brugermanual m.m. vedrørende brug af GLS5.1.

| Time to care |

Kontakt Guldmann på:

Salg: +45 8741 3100
salgdk@guldmann.com
Service: +45 8741 3191
service@guldmann.com