

# Gazelle Rollator

Brugervejledning



**Kontakt:**

**Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
8660 Skanderborg  
Danmark**

# **Gazelle Rollator**

## **Inholdsfortegnelse**

Gazelle Rollator Inholdsfortegnelse.....	2
1 Gazelle Rollator Einleitung.....	3
2. Gazelle Rollator Sikkerhedsvejledning.....	4
2.1 Anvendte symboler.....	4
2.2 Sikkerhed – generelle henvisninger.....	4
3 Gazelle Rollator Formålsbestemmelse .....	5
2 Gazelle Rollator Anvendelse.....	5
3 Gazelle Rollator Konformitetserklæring.....	6
Gazelle Rollator Produktopbygning .....	7
6.1 Produktopbygning / Produktbeskrivelse.....	7
7 Gazelle Rollator Leveringsbeskrivelse.....	7
4 Gazelle Rollator Anvendelsevejledning.....	7
5 Gazelle Rollator Teknisk data.....	8
6 Gazelle Rollator Typeskilt.....	8
7 Gazelle Rollator Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.....	8
8 Gazelle Rollator Vedligeholdelse.....	9
9 Gazelle Rollator Bortskaffelse.....	9
10 Gazelle Rollator Garantierklæring.....	10
11 Gazelle Rollator Egne Notater.....	10

Den efterfølgende brugervejledning giver Dem beskrivelser til betjening og vedligeholdelse af Gazelle Rollatoren.

Ved spørgsmål er de velkommen til at henvende Dem ved:

**Mobilex A/S**

**Nørskovvej 1**

**8660 Skanderborg**

**Danmark**

Telefon: +45 87932220

Telefax: +45 87931777

E-mail .: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

### 2.1 Anvendte symboler

I brugervejledningen anvendes følgende symboler.

#### **Advarsel**

Disse symboler kendetegner sikkerhedshenvisninger, der kan medføre fare, hvis de ikke følges.

#### **Henvisning**

Under dette symbol finder de vejledning til anvendelse af rollatoren.

### 2.2 Sikkerhed – generelle henvisninger.

Sørg for at alle personer, der anvender rollatoren læser dette. Skader, der opstår, fordi henvisningerne ikke er fulgt, vil ikke blive accepteret som leverandøransvar.

#### **Indskrænkninger i anvendelsen**

Gazelle rollatoren må ikke belastes med mere end 120 kg.

Indkøbskurven må ikke belastes med mere end 7 kg.

Man må ikke transportere personer på sædet.

#### **Uheldsfare**

Benyt kun rollatoren til det formål, den er beregnet til.

Anvend kun rollatoren i teknisk perfekt tilstand.

Undlad at lave konstruktive ændringer uden skriftlig tilladelse fra leverandøren.

Ved alle rollatorens led er der forhøjet risiko for klemskader.

Check bremsefunktionen før anvendelse.

Benyt kun rollatoren i fuldt udklappet tilstand. Kontroller at klapmekanismen er i fastlåst tilstand.

Benyt kun rollatoren på fast, jævn undergrund.

Benyt kun sædet på rollatoren med bremserne låst.

Bremserne skal altid bremses på samme tid.

### **3 Gazelle Rollator** ..... **Formålsbestemmelse**

**Zebra** rollatoren er beregnet til at blive anvendt såvel ude som inde. Den skal afhjælpe gangbesvær og manglende balance og øge brugerens bevægelsesfrihed. Rollatoren må kun bruges af én person.

### **2 Gazelle Rollator** ..... **Anvendelse**

Gazelle rollatoren anvendes til personer, der har brug for støtte ved gang.

**Producent:**

Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
8660 Skanderborg  
Danmark

Erklærer hermed at produktet: **Gazelle Rollator**

er produceret i henhold til den tekniske dokumentation, og opfylder de grundlæggende krav beskrevet i:

Retningslinjer 93/42/EWG for Medicinske produkter, tillæg I fra 14 Juni 1993  
DIN EN ISO 11199-2 (2003-04) Gåhjælpemidler for to-armsbetjening – krav og testmetoder – Del 2: Rollatorer

**Ansvarlig:**

**Firma:** Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

**Stilling:** Adm. Direktør

**Navn:** Lars Nygaard

Skanderborg 10/3-2005


-----  
Dato



-----  
Underskrift

### 6.1 Produktopbygning / Produktbeskrivelse

Gazelle Rollatoren er fremstillet af aluminium.

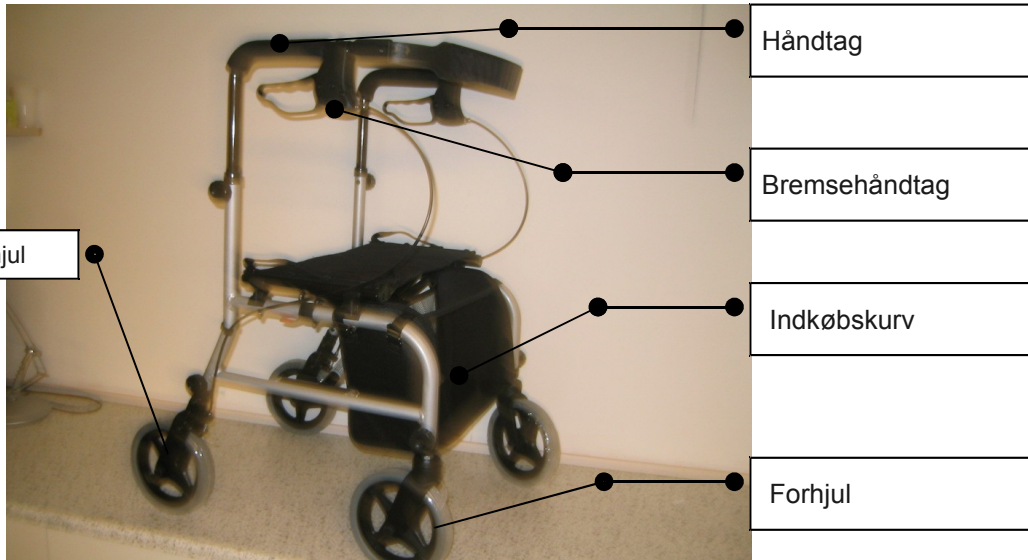

## 7 Gazelle Rollator

## Leveringsbeskrivelse

Gazelle rollatoren leveres i en karton.

Indholdet består af:

- 1 rollator
- 1 par håndtag med rygstøtte
- 2 håndskruer
- 1 brugervejledning

Håndtagene med rygstøtten skal monteres med de medfølgende håndskruer.

## 4 Gazelle Rollator

## Anvendelsevejledning



Ved at klappe rollatoren sammen, kan der spares plads f.ex ved transport.

Håndtagene kan indstilles, så den passer til kropsbygningen.

Sædet kan anvendes, når der er brug for en pause.

## 5 Gazelle Rollator

## Teknisk data

Gazelle Rollator	
Max. belastning :	120 kg
Vægt med tilbehør / uden tilbehør	7 kg
Længde:	65 cm
Bredde:	56 cm
Højde:	76 – 97 cm
Mål foldet sammen (LxBxH):	65 cm x 20 cm x 89 cm
Type bremse	2 x Bremse der kan blokeres
Venderadius	120 cm
Vinkel mellem linie gennem håndgrebene og bevægelsesretningen.	0° (parallel)

## 6 Gazelle Rollator

## Typeskilt

Typeskiltet og serienummerskiltet befinder sig på tværstangen på forrammen..

Afbildning af Typeskiltet:



## 7 Gazelle Rollator

## Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning

- Ved rengøring bør der ikke anvendes skarpkantede værktøjer eller aggressive opløsningsmidler. Højtryksrenser må heller ikke anvendes.
- Større urenheder kan fjernes med neutrale rengøringsmidler.
- Lette urenheder kan fjernes med en fugtig klud



## **8 Gazelle Rollator**

## **Vedligeholdelse**

Gazelle rollatoren er generel vedligeholdelsesfri, men skal dog en gang per år checkes af en fagmand. Hvis der under brug forekommer mangler, som f.eks manglende bremsevirkning, må rollatoren ikke længere anvendes før reparation har fundet sted.

### Det årlige check skal indeholde:

Visuelt check af alle dele for at konstatere evt. bøjning af stel, beskadigelse, slitage eller korrosion:

- Rollatorstel
- Håndtag
- Håndgreb
- Bremsehåndtag
- Bremsekabler
- Hjulgafler
- Hjul
- Bremsler
- Sædet
- Indkøbskurv

Alle skruer, møtrikker skal kontrolleres for at sikre at de er korrekt fastgjort.

Bremsens funktion afprøves:

- Opbremsning af rollator
- Fatsgørelse af bremsehåndtag

## **9 Gazelle Rollator**

## **Bortskaffelse**

Rollatoren skal afleveres på kommunal genbrugsplads.

## 10 Gazelle Rollator

## Garantierklæring

Producenten giver 1 års garanti ved produktionsfejl, samt 2 års reklamationsret iht. købeloven. Garanti og reklamationsret bortfalder ved fejlagtig anvendelse af rollatoren.

## 11 Gazelle Rollator

## Egne Notater

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---