



Brugervejledning til

PALLAS 2000

**ERGOLET A/S, TÅRNBORGVEJ 12 C, 4220 KORSØR TLF. 58 37 37
20**

Version 4 – 05.10.07

SAMLEANVISNING

Der anvendes to 17 mm fastnøgler el.lign. ved monteringen.



1. Den vertikale stander sættes i beslag på tværbom. Stop på stander skal være under håndskruen, så den virker som en lås. Håndskruen strammes, til standeren sidder helt fast.



2. Armen monteres på standeren med den medfølgende skrue og låsemøtrik



3. Armen løftes op, og motoren fastgøres i topbeslaget med pal og låsering.



4. Knæstøtte og fodplade monteres.



5. Elboksen hænges på den indvendige side af kørehåndtagene.

6. Tilslut kablet fra løftemotor til det yderste stik i bunden af elboksen.
(Er der motor til benspredning, tilsluttes kablet fra denne til det inderste stik i bunden af elboksen)

7. Tilslut kablet fra håndbetjeningen bag på elboksen.

8. Tilslut ladestikket ovenover stikket til håndbetjeningen

9. Kontroller at den røde nødstopknop på toppen af elboksen er ude - hvis ikke drejes den i pilens retning til den springer ud.

10. Prøvekør liften, inden den tages i brug

TILBEHØRSLISTE

Brystsejl (lagervare)
Hemiarmslynge (lagervare)
T-greb (lagervare)
Sædesejl (lagervare)
Brystsejl med delt mavebælte (specialfremstilles)
Fodpladeforhøjer (specialfremstilles)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER PALLAS 2000

Løftemotor:	Linak LA 32-SKSM-300-24
Lader m/spiralkabel	30V/2,9Ah
2 stk. batterier	12V, 2.9Ah
Sikringer	500 amp. autosikring
*) Print til 1 motor	SMD1
*) Håndbetjening	HB-41-29
*) Specielt til Pallas 2000 m/elbenspredning:	
Benspredningsmotor:	Linak LA 28.1S-100-24
Print til 2 motorer	SMD2
Håndbetjening	HB-42-00

SÅDAN BRUGES PALLAS 2000

PÅSÆTNING AF SEJL



Placer brystsejlet med mærkaten udad og med rygdelen så langt nede på klientens lænd som muligt.



Træk bæltet frem og luk det med velcrobåndet.



Lås spænderne og træk selerne stramt til. Vær opmærksom på at spænderne sidder under ribbenskanten.

Spred løfterens ben, inden den køres hen til brugeren.

INDSTILLING AF KNÆSTØTTE



Klientens fødder placeres på ståløfterens fodplade.

Knæstøtten indstilles i højde og dybde ved hjælp af skruegrebene.



Spænd om nødvendigt stroppen bag om klientens ben.

Som hovedregel anbefaler vi, at knæstøtten placeres med overkanten under knæskallen, men der er tilfælde, hvor en placering direkte på knæene er at foretrække.

DET NORMALE LØFT

Træk sidestykkerne frem under klientens arme og fastgør stropperne i løftekrogene.

Som tommelfingerregel gælder, at stropperne skal være korte til en høj person og længere til en lav person.

Det er dog meget individuelt, men farvekoderne gør det nemt at huske længden på stropperne, næste gang sejlet anvendes.




Klienten griber fat om løftearmenes håndtag, og løftet startes ved at trykke på håndbetjeningen.
Bed Klienten læne sig tilbage.

(Hvis bæltet ikke blev strammet tilstrækkeligt i første omgang, spændes det efter, når Klienten er løftet en anelse).



NB. Løft ikke klienten højere end nødvendigt.

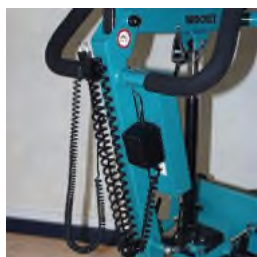

OPLADNING

Stikket på spiralledning bag på løfteren sættes i stikkontakten. Mens der lades, vil den lille grønne lampe på opladeren lyse.

Hvis advarselsslampen øverst på elboksen begynder at lyse, skal der lades op snarest.

Nødstoppet må ikke være trykket ned, og løfteren må ikke betjenes under opladning.

Ladestik må ikke afmonteres under normal brug – og aldrig imens opladning foregår.

VEDLIGEHOLDELSE

- På nær actuator, lader og elboks er løfteren vaskbar med rengøringsmidler eller desinficerende midler.
- Skumpolstringen på løftearme og kørehåndtag kan udskiftes.
- Batteriernes levetid forlænges, hvis de lades op regelmæssigt f.eks. hver nat. (De kan ikke overoplades).

SPECIELLE FUNKTIONER



DET AKTIVE LØFT

I de tilfælde, hvor klienten kan trække sig op til stående men føler sig usikker, kan det aktive løft være et godt alternativ til det normale løft.

Klienten lader armene være inden for løftestropperne og griber fat om løftearmens tværstang eller et T-greb (tilbehør). Klienten kan da hjælpe til med at trække sig op til stående stilling.

Det er en god ide, hvis hjælperen beder klienten rejse sig, *santidig* med at løfteren aktiveres.



BRUG AF ARMSLYNGE (tilbehør)

Har klienten en lammet arm, benyttes en hemiarmslyng sammen med brystsejlet. Armslyngen er indstillelig og kan sættes på flere måder, alt efter det aktuelle behov.


For at skåne den dårlige skulder lader man brystsejlets sidestykke gå *uden om* armen i den lammede side. Lad stropen være en tand længere end i rask side.

Under løftet øver hjælperen med hånden et let pres på klientens skulder, så den bliver holdt tilbage.



SÆDESEJL

(tilbehør)

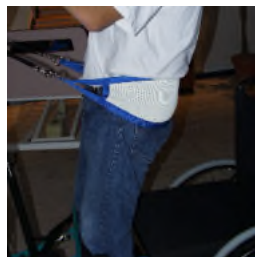

Sædeejlet giver et meget fremadrettet træk. Samtidig med at det hjælper klienten med at få bagdelen med op, stimulerer det til vægtbæring på benene. Sædeejlet bruges normalt sammen med brystsejlet og kan tages af eller trækkes op, når klienten er kommet op at stå.

Sædeejlet kan også anvendes i træningssituationer evt. sammen med T-grebet.



SIDDENDE FORFLYTNING

Fodplade og knæstøtte kan evt. afmonteres.

Der anvendes sejl med benstroppe.

Sejlet sættes, som når man anvender standard personløfter.

Dette løft bruges til siddende forflytning f.eks. fra kørestol til lænestol.

NB. I de næste situation skal løfterens hjul låses, mens løftet forberedes og udføres.



ANVENDT SOM GANGREDSKAB

Fodplade og knæstøtte afmonteres

Der anvendes brystsejl.

Hjælperen trækker løfteren i takt med klientens skridt.

En ekstra hjælper kan evt. styre klienten bagfra ved at holde i sejlets sidestroppe

SIKKERHEDSANVISNING

- Personløfteren må kun anvendes til at løfte personer
- Løfteren må maksimalt løfte 150 kg
- Sørg for inden brug, at liften er samlet og efterset efter anvisningerne i denne vejledning
- Kun seler/sejl designet til 2-punkts løftekroge må anvendes
- Personløfteren må kun betjenes af personer, der er fortrolige med brugen af den
- Kontroller altid, at der ikke er fare for klemning af personer før og under løft
- Løft aldrig klienten, hvis der er fejl eller mistanke om fejl på løfteren (mislyd, løse samlinger osv.)
- Løft aldrig klienten højere end nødvendigt
- Lås ikke løfteren hjul under normale løft (I visse situationer skal hjulene dog låses, mens man forbereder løftet. Det vil i så fald fremgå af teksten)
- Sørg for fri bane og fast underlag, når der manøvreres med løfteren
- Kør så lidt som muligt med klienten stående i løfteren
- Den røde nødstopknop øverst på elboksen afbryder strømmen øjeblikkeligt, hvis den trykkes ned. For atter at tilslutte strømmen, drejes knappen en kvart omgang i pilens retning, til den springer ud.
- Under elboksen er der en trykknop til nødnedfir. Knappen skal **kun** anvendes ved strømsvigt.
- Løfteren skal efterses mindst én gang årligt efter anvisninger beskrevet i *Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*. Eftersynet skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig.

