

BRUGSANVISNING: SYSTEM Viscoflex Topmadras

System Viscoflex er trykfordelende topmadras, der anvendes i plejesenge til at behandle eller forebygge tryksår. Madrassen kan anvendes i senge med indstillelig sengebund.

Madrassen er fremstillet i viskoelastisk skum, som er støbt i ét stykke. Madrassen har rigtig god bæreevne, og den viscoelastiske skum giver trykfordeling ved bedre nedsynkning i madrassen. Det kubiske design forbedrer endvidere luftcirkulationen.

Før brug:

- Madrassen leveres sammenrullet.
- Sørg for at madrassen vender rigtigt. Korrekt placering i sengen er markeret på både skum og betræk.

Advarsel:

- Madrassen er kun beregnet til vægten af én person
- Madrassen bør aldrig anvendes uden betræk
- Madrassen er temperaturfølsom. Den optimale nedsynkning sker, når madrassen har stuetemperatur. En kold madras er hårdere at ligge på.

Rengøring, opbevaring og bortskaffelse

Madrassen kan aftørres med en opvredet klud eller svamp eller med desinfektionsspray. Madrassen må ikke ligge i blød.

Betrækket er strækbart, åndbart og uigennemtrængeligt for væske. Det er fra start behandlet med allergivenligt, antibakterielt og bakteriehæmmende middel. Betrækket kan vaskes i maskine på 95 ° og tørretumbles på lav varme. Betrækket er modstandsdygtigt over for klorin. Betrækket tåler ikke strygning eller rensning.

Både madras og betræk skal tørre helt op inden ibrugtagning efter rengøring

Bør opbevares flat i et tørt og opvarmet rum. Må ikke udsættes for høj varme og må ikke opbevares i direkte sollys.

Der er ingen restriktioner for bortskaffelse.

Rengøring af betræk



Rengøring af skum

