



Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Kom i gang session med Victor Reader Classic

Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller. Simpel og venlig er Victor Reader Classic ideel at lytte til dine foretrukne bøger, noveller, magasiner, indspillet på CD-ROM. Kompakt, portabel og modstandsdygtig går Victor Reader Classic alle steder sammen med dig med genopladelige batterier og indbygget bærehåndtag.

Den første gang, du anvender Victor Reader, skal du tilslutte enheden til en stikkontakt, selvom den er forsynet med genopladelige batterier. Batterierne kan have tabt effekten under forsendelse, selvom de blev opladet, inden de forlod fabrikken. Af sikkerhedsmæssige grunde er der ingen adgang til batterierne. Kun HumanWare eller et autoriseret servicecenter bør udskifte batterierne.

For at slutte den til en stikkontakt sættes den ene ende af den medfølgende lysnetlader i det øverste af de fire stik på højre side af enheden, og 220v stikket i stikkontakten. Bemærk venligst, at du kan anvende Victor Reader under opladning af batterierne.

Boksen, du netop har åbnet, indeholder følgende ting: En Victor Reader Classic, en AC/DC adapter med 220v kabel eller stik til at sætte i stikkontakten, en plastikpose med dokumentation og den CD, som du sidder og lytter til. Den indeholder Kom i gang sessionen efterfulgt af Brugervejledningen.

Denne introduktion giver skridt for skridt instruktioner og den grundlæggende information, som er nødvendig for at kunne anvende Victor Reader korrekt. Du vil først høre en fysisk beskrivelse af enheden. Derefter vil vi introducere Victor Reader brugervenlige funktioner.

Denne introduktion er ikke en fuldstændig træningssession, men Brugervejledningen, som følger med på denne CD, vil hjælpe dig med specifik information om Victor Reader's funktioner, efterhånden som du får brug for dem.

Inden vi begynder, skal du bemærke, at du kan afbryde denne session på et vilkårligt tidspunkt ved blot at trykke **Start/Stop**, som er placeret i midten nederst på oversiden imellem **Tilbagespoling** og **Fremadspoling**. Når du er klar til at fortsætte sessionen, skal du blot trykke **Start/Stop** knappen igen.

Vi er nu klar til at starte sessionen.

Her er først en fysisk beskrivelse af Victor Reader Classic. Placer enheden foran dig, så du kan undersøge den nærmere.

I venstre side er der et stort bærehåndtag for nem transport. Den indbyggede højttaler er placeret i det øverste venstre hjørne.

På oversiden i midten er der tre sæt knapper for op og nedregulering. De er fra venstre mod højre Tone, Lydstyrke og Hastighed.

Nedenunder Tone, Lydstyrke og Hastighed knapperne omkring midten af enheden vil du finde Navigeringsknapperne - som peger **OP**, **NED**, **VENSTRE** og **HØJRE**. Disse gør det muligt for dig at flytte fra side til side, fra kapitel til kapitel, og fra sektion til sektion.

Til venstre for de fire Navigeringsknapper omkring midtvejs nede på enheden er der yderligere to knapper. Den øverste er **Info** knappen, og den nederste er **Bogmærke** knappen. **Info** knappen giver dig din aktuelle position i bogen, samt generel information om bogen. **Bogmærke** knappen indsætter bogmærker for at gemme vigtige sider og afsnit for fremtidig reference.

Nedenunder de fire Navigeringsknapper vil du fra venstre mod højre finde: **Tilbagespoling**, **Start/Stop** og **Fremadspoling** knapperne.

Til højre for disse og lidt op finder du yderligere to knapper. Den øverste, som er lidt forsænket, er **Tænd/Sluk**, og nedenunder denne er **Eject**, som benyttes til at skubbe CD'en ud af drevet. Bemærk, at CD'en ikke vil falde ned, når den skubbes ud.

På den højre side af enheden regnet bagfra mod forkanten finder du strømstikket (identificeret med 3 fremhævede linier) for tilslutning af oplader, en linieudgang (identificeret med 2 fremhævede linier) for tilslutning til et lydanlæg, et fjernbetjeningsstik (identificeret med en enkelt fremhævet linie) for tilslutning af for eksempel en fodkontakt til brug for håndfri betjening af start stop og tilbagespoling. Til slut nær ved forkanten er stikket til hovedtelefon eller eksterne højtalere.

På forsiden af enheden finder du sprækken til CD-ROM drevet.

Dette afslutter den fysiske beskrivelse. Lad os nu se, hvor nemt det er at anvende funktionerne.

At indsætte og afspille en ny bog

Tænd for Victor Reader ved at trykke og holde **Tænd/Sluk** knappen, som findes oven over **Eject** knappen på oversiden af enheden, nede. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeldelse.

Indsæt din CD'er i sprækken, som findes på den forreste kant af enheden. Skub forsigtigt CD'en fremad. Drevmekanismen vil så tage over, og automatisk sørge for indsættelsen af CD'eren. Efter et par sekunder vil Victor Reader annoncere titlen på bogen, og starte afspilningen.

Bemærkning: *Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.*

Du kan justere Tone, Lydstyrke og Hastighed ved at trykke op eller ned knapperne. Tone, Lydstyrke og Hastighed kontrollerne er placeret øverst oppe foroven fra venstre mod højre.

For at gå tilbage eller fremad i bogen ved høj hastighed skal du trykke og holde **Tilbagespoling** eller **Fremadspolning** nede, indtil du er kommet til det ønskede sted, og derefter slippe den. Den normale afspillehastighed vil blive genoptage.

For at holde en pause i oplæsningen

For at holde en pause i oplæsningen af en bog tryk blot **Start/Stop**. For at genoptage læsningen, hvor du stoppede, tryk igen **Start/Stop**. Bemærk, at hvis din enhed ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand for mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

For at slutte oplæsningen

For at afslutte en oplæsning så sluk blot for enheden ved at trykke og holde **Tænd/Sluk** nede. Victor Reader vil huske, hvor du nåede til i bogen, når du igen vil læse den.

For at starte en ny oplæsning

For at starte en ny oplæsning i den samme bog så tænd for din Victor Reader ved at trykke og holde **Tænd/Sluk**. Efter et par sekunder vil du høre titlen på bogen, et lydsignal og oplæsningen vil starte der, hvor du nåede til sidst.

For at skubbe en CD'er ud

For at skubbe en CD'er ud skal du blot trykke **Eject**. Victor Reader vil sige Eject, og efter et par sekunder vil den motoriseret mekanisme blidt skubbe CD'en ud af drevet.

Og det er alt! Nu ved du allerede meget mere om brugen af Victor Reader. For at lære alle funktioner i detaljer se venligst den efterfølgende Brugervejledning. Den vil sætte dig i stand til at bruge det fulde potentiale i den talende bogafspiller. For eksempel vil du lære, hvorledes du kan bladere fra side til side, eller fra kapitel til kapitel og så fremdeles.

Vi er nu kommet til slutningen af Kom i Gang sessionen. HumanWare ønsker dig mange fornøjelige timer med læsningen, efterhånden som du lærer din Victor Reader Classic bedre at kende. Brugervejledningen vil starte i løbet af nogle få sekunder.

Brugervejledning

Om Victor Reader Classic

HumanWare er stolt over at kunne introducere Victor Reader Classic, den enkle og brugervenlige afspiller for den digitale talende bog.

Enkel og brugervenlig. Victor Reader Classic blev designet til at afspille romaner, noveller, magasiner med mere. Den gør det nemt for dig at navigere i strukturen, og hurtigt komme til den ønskede information.

Med dens funktioner, som er nemme at anvende, kan du konsultere indholdsfortegnelsen, gå til et afsnit, eller vende tilbage til et bogmærke.

Vi ønsker dig mange behagelige timer med at opdage alle mulighederne i din afspiller for den digitale talende bog!

Anerkendelse

HumanWare ønsker at takke Instrulog Rehab a/s for indspilningen af Victor Reader Classic Kom i gang og Brugervejledning.

©Copyright 2005. All rights reserved, Technologies HumanWare Canada Inc.

Denne manual er beskyttet ved copyright tilhørende HumanWare, alle rettigheder reserveret. I henhold til copyright loven må denne manual hverken helt eller delvist kopieres uden skriftlig tilladelse fra HumanWare.

Indholdsfortegnelse

1.	OVERSIGT OVER VICTOR READER CLASSIC	1
1.1	Udpakning af enheden	1
1.2	Fysisk beskrivelse af Victor Reader	2
1.2.1	Overside af enheden	2
1.2.2	Venstre side af enheden.....	2
1.2.3	Højre side af enheden	2
1.2.4	Forkanten af enheden.....	2
1.3	Begrænset brugerflade.....	2
1.4	Tænd for Victor Reader	3
1.5	Batterier.....	3
1.6	Indsætte og udtage en CD	3
2.	GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER	4
2.1	Kontrolfunktioner	4
2.2	Start/Stop	4
2.3	Tilbagespoling og fremadspoling.....	4
2.4	Tastaturhjælp tilstand	4
3.	NAVIGERINGSFUNKTIONER	5
3.1	Navigeringsknapper.....	5
3.2	Boghylde	5
3.3	Tidshop navigeringstilstand	5
3.4	Ti sider hop.....	6
3.5	Skipbare elementer	6
4.	AVANCEREDE FUNKTIONER	7
4.1	Info knap.....	7
4.1.1	Mulige tilgængelige emner.....	7
4.2	Dvale tilstand:.....	7
4.3	Bogmærker.....	7
4.3.1	Indsætte bogmærker	7
4.3.2	Gå til et Bogmærke.....	8
4.3.3	Slette bogmærker	8
4.4	Fortryd/Udfør igen funktioner.....	8
5.	LYTTE TIL EN MUSIK ELLER MP3 CD	9
5.1	Funktioner	9
6.	FEJLRETNING	10
6.1	Bognavigering	10
6.2	Batterier og opladning	10
6.3	CD'er	11
6.4	Generelt.....	12
7.	TEKNISKE SPECIFIKATIONER	14

1. Oversigt over Victor Reader Classic

1.1 Udpakning af enheden

Victor Reader Classic pakken indeholder:

Den digitale talende bogafspiller Victor Reader Classic, en AC/DC lader med 220v ledning, en plastikpose med documentation, en Brugervejledning og en Kom i Gang session påCD. Om nødvendigt kan du kan udskrive Brugervejledningen og Kom i Gang sessionen.

Vær venligst sikker på, at du har modtaget alle tingene, og at intet er beskadiget under forsendelsen.

Bemærk venligst, at inden du bruger Victor Reader den første gang, er det nødvendigt at slutte den til en stikkontakt. Batterierne kan have tabt deres ladning under forsendelsen. Hvis batterierne er fuldstændigt afladede, vil det tage 11 timer for en fuld opladning. Bemærk venligst, at du kan anvende din Victor Reader, mens batterierne lades op. Af sikkerhedsmæssige grunde er der ingen adgang til batterierne. Kun HumanWare eller et autoriseret servicecenter bør udskifte batterierne.

Hvis der mangler en af de ovenfor nævnte ting, så kontakt venligst HumanWare eller Instrulog Rehab a/s:

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

Fax: 1 (819) 471-4828

E-mail: ca.support@humanware.com

Web: www.humanware.ca

I visse lande kan pakken også indeholde et kort, som skal udfyldes, hvis man ønsker at købe en udvidelse til den generelle garanti. Hvis du finder dette kort, og er interesseret i den udvidede garanti, så bemærk venligst, at kortet skal returneres indenfor 30 dage. Hvis du har et problem med at udfylde kortet, eller ønsker yderligere information, så kontakt venligst HumanWare.

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

E-mail: ca.sales@humanware.com

1.2 Fysisk beskrivelse af Victor Reader

1.2.1 Overside af enheden

Den indbyggede højttaler befinder i det øverste venstre hjørne på oversiden.

Der er tre sæt af to op og ned knapper øverst oppe på oversiden. De er fra venstre mod højre **Tone, Lydstyrke** og **Hastighed**.

Nedenunder **Tone, Lydstyrke** og **Hastighed** kontrollerne finder du fire pileformede navigeringsknapper, **Op, Ned, Venstre** og **Højre**, som gør det nemt for dig at flytte igennem strukturen i en bog.

Til venstre for de fire navigeringsknapper midtvejs nede på enheden er der yderligere to knapper. Den øverste er **info** knappen. Den giver dig information om bogen, såsom antal sider, total afspilletid, resterende afspilletid og den aktuelle side. Den anden knap er **Bogmærke** knappen, som benyttes til at indsætte et bogmærke.

Nedenunder de fire Navigeringsknapper finder du: **Tilbagespoling, Start/Stop** og **Fremadspoling**.

Til højre for disse tre knapper og lidt op finder du yderligere to knapper. Den øverste, som er lidt forsænket, er **Tænd/Sluk** knappen, og nedenunder er **Eject** knappen, som benyttes til at skubbe CD'en ud af drevet.

1.2.2 Venstre side af enheden

På den venstre side af enheden finder du det indbyggede bærehåndtag og højttaler.

1.2.3 Højre side af enheden

På den højre side af enheden regnet bagfra mod forkanten finder du *strømskikket* (identificeret med 3 fremhævede linier) for tilslutning af oplader, en *linieudgang* (identificeret med 2 fremhævede linier) for tilslutning til et lydanlæg, et *fjernbetjeningsstik* (identificeret med en enkelt fremhævet linie) for tilslutning af for eksempel en fodkontakt til brug for håndfri betjening af start stop og tilbagespoling. Til slut nær ved forkanten er stikket til hovedtelefon eller eksterne højttalere.

1.2.4 Forkanten af enheden

På forsiden af enheden finder du sprækken til CD-ROM drevet.

1.3 Begrænset brugerflade

Visse biblioteker og forhandlere har valgt at begrænse funktionaliteten af din Victor Reader Classic. Hvis din afspiller er sat op i begrænset tilstand, vil følgende knapper have en anden opførelse:

De fire **Navigering** knapper er deaktiveret. Der høres ingen lydsignaler, når disse knapper trykkes.

Tryk på **Fremadspoling** og **Tilbagespoling** vil ikke aktivere **Fortryk/Gør om igen** funktionerne. Kun et lydsignal høres, når disse knapper trykkes.

Bogmærke funktionen er deaktiveret. I stedet for anvendes **Bogmærke** knappen som en **Dvale** knap. Hver efterfølgende tryk vil aktivere 15, 30, 45 eller 60 minutters eller ingen forsinkelse, inden Victor Reader automatisk slukker. Standard er ingen.

Info knappen vil ikke have Dvaletilstand funktionen for normal afspiller betjening.

Bemærkning: Hvis du har en begrænset afspiller, og ønsker at gendanne de udvidede funktioner, kontakt venligst din forhandler eller bibliotek.

1.4 Tænd for Victor Reader

For at tænde for enheden skal **Tænd/Sluk** trykkes og holdes. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

For at slukke for enheden skal **Tænd/Sluk** blot trykkes igen. Du vil høre to lydsignaler, som indikation af, at enheden slukker.

1.5 Batterier

Batterierne er beregnet til cirka 500 opladningsforløb. Under normale betingelser vil fuldt opladede batterier kunne holde i op til 5 timer kontinuerlig afspilning af DAISY bøger. Men levetiden for batterierne kan være mindre i følgende tilfælde:

Batterierne er blevet ladet op i mindre end 11 timer.

Omfattende brug af navigeringskommandoer i bogen.

Ikke DAISY CD'ere bruger mere strøm, hvorfor batterierne kun kan holde i cirka 2 timer.

Høj lydstyrke eller læsning ved høj hastighed.

Bemærkning: Hvis din enhed ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand i mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

Bemærkning: Af sikkerhedsmæssige grunde er der ingen adgang til batterierne. Kun HumanWare eller et autoriseret servicecenter bør udskifte batterierne.

1.6 Indsætte og udtage en CD

Sæt din CD'er i sprækken på forkanten af enheden. Skub dernæst forsigtigt CD'en fremad. En motoriseret mekanisme vil trække CD'en ind i drevet. Efter et par sekunder vil Victor Reader annoncere titlen på bogen, og efter et lydsignal starte oplæsningen af bogen. Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.

For at skubbe en CD'er ud skal der blot trykkes på **Eject** knappen, som findes til højre for og lidt oppe i forhold til **Fremadspoling** knappen. En motoriseret mekanisme vil derefter forsigtigt skubbe CD'en ud af drevet.

Bemærkning: Eject knappen fungerer kun, når der er tændt for Victor Reader.

2. Grundlæggende funktioner

2.1 Kontrolfunktioner

Hver af **Tone**, **Lydstyrke**, og **Hastighed** kontrollerne har en **Op** og **Ned** knap. Det øvre og nedre område for hver kontrol markeres med et lydsignal. Hvis der ikke afspilles nogen bog, vil Victor Reader annoncere indstillingen. For tone og hastighed er der også et lydsignal for normal eller nul positionen. Dette indikerer enten en flad toneindstilling eller den normale indstilling for hastigheden.

2.2 Start/Stop

For at starte afspilningen af en bog tryk på **Start/Stop**.

For at stoppe afspilningen af en bog tryk igen på **Start/Stop**.

Bemærkning: Tryk **Start/stop** for at bekræfte den aktuelle handling, og afspilning vil starte med det samme.

2.3 Tilbagespoling og fremadspoling

Disse knapper tillader dig at gå hurtigt tilbage eller fremad. Du vil høre optagelse ved højere hastighed.

Tryk og hold **Tilbagespoling** eller **Fremadspoling**, indtil du kommer til det ønskede sted. Flytningen med **Tilbagespoling** eller **Fremadspoling** vil accelerere, jo længere du holder knappen nede. For hver fem sekunder, knappen holdes nede, vil du flytte fremad eller tilbage 1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og så videre. Det største hop er 5 minutter. Victor Reader vil annoncere tidshoppene, og afspille et udklip ved normal hastighed imellem hvert tidshop.

2.4 Tastaturhjælp tilstand


Med *Tastaturhjælpen* kan brugeren høre funktionerne af de enkelte knapper på Victor Reader. Dette er specielt nyttigt under optræning i brug af enheden, eller til blot at hjælpe lidt på hukommelsen.

Hvis der in CD'er er i drevet: *Tastaturhjælp* tilstanden aktiveres automatisk.

Mens du er i *Tastaturhjælp tilstand*, kan du trykke en vilkårlig knap for at høre dens funktion.

3. Navigeringsfunktioner

3.1 Navigeringsknapper

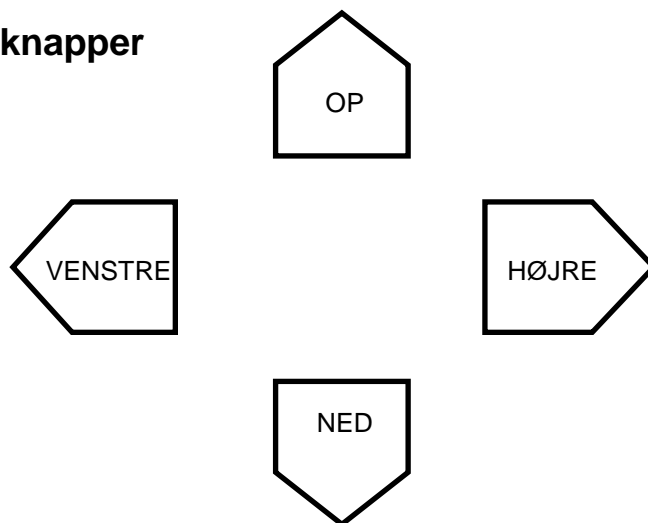

Nedenunder **Tone**, **Lydstyrke** og **Hastighed** knapperne finder du de fire Navigeringsknapper. **Op**, **Ned**, **Venstre** og **Højre**. Disse knapper gør det nemt for dig at flytte fra et bogelement til et andet for hurtigt at komme frem til den ønskede information.

Eksempler: flytning ved kapitel, afsnit, side, afsnit, bog, eller andre elementer, defineret af producenten af bogen.

Vælg først et bogelement (kapitel, side osv..). Tryk **OP** eller **NED** knappen flere gange, indtil du hører det ønskede element. Det sidst oplæste element er det valgte.

Benyt dernæst **HØJRE** knappen for at flytte fremad, eller **VENSTRE** knappen for at flytte tilbage fra et tekst element til et andet, indtil du når det ønskede bog element. Det sidst oplæste element er det valgte. Oplæsning vil starte i det valgte bogelement.

Bemærkning: *Hvis afspilleren er i begrænset tilstand, vil **Navigation** knapperne være deaktiveret. Der høres ingen lydsignaler, når disse knapper trykkes.*

3.2 Boghylde

For at få adgang til Boghylden trykkes **Op** eller **Ned**, indtil Victor Reader annoncerer "Boghylde". Knapperne **Venstre** og **Højre** giver dig mulighed for at flytte fra titel til titel, så du kan vælge den ønskede bog. Når du trykker disse knapper, vil Victor Reader første gang annoncerer antallet af bøger på CD'en, samt titlen på den aktuelle bog. Når du trykker Venstre og Højre igen, vil Victor Reader kun annoncerer titlen på den næste bog. Bekræft valget med Start/stop knappen. Victor Reader vil starte med at afspille den valgte bog. Bemærk, at Boghylden kun findes, hvis der er mere end en bog på CD'en.

3.3 Tidshop navigeringstilstand

Tidshop navigering er mulig i Daisy bøger. Hvis den er valgt, kan den aktiveres ved brug af **Op** og **Ned** knapperne.

Tryk **Op** eller **Ned** for at vælge navigeringsniveau, indtil Victor Reader annoncerer "Tidshop" efterfulgt af *Hopinterval*.

Tryk **Venstre** for at flytte tilbage, eller **Højre** for at flytte fremad i tidsintervallet.

3.4 Ti sider hop

Venstre og **Højre** giver dig mulighed for at flytte i 10 siders spring af gangen for hurtigt at komme til en bestemt side.,

Vælg Side navigeringselement ved at trykke **Op** eller **Ned**, indtil du hører "Side".

Tryk og hold derefter **Tilbage** eller **Fremad**. Du vil høre, Victor Reader gå fremad eller tilbage i hop på 10 sider.

Slip knappen, når du er tæt på den ønskede side, og flyt derefter en side af gangen ved at trykke henholdsvis **Tilbage** eller **Fremad**, indtil du når den ønskede side.

3.5 Skipbare elementer

Som fabriksstandard er din Victor Reader konfigureret til at afspille ekstra materiale, også kaldet skipbare elementer, såsom sidenumre, baggrundsinformation, fodnoter og producentnotater.

Ikke alle bøger er produceret med skipbare elementer, og afspilleren kan ændres til ikke at afspille skipbare elementer.

Hvis du ikke hører skipbare elementer, kan det enten betyde, at dine bøger ikke har nogle, eller at din forhandler har deaktiveret denne funktion i din Victor Reader. Kontakt venligst producenten af din bog eller forhandler for yderligere information.

4. Avancerede funktioner

4.1 Info knap

Bemærkning: Hvis din afspiller er sat op i begrænset tilstand, vil **Info** knappen kun have info funktionen. Trykkes Info knappen flere gange skifter den ikke imellem Info og Dvale funktionerne som i normal tilstand.

Info knappen giver direkte adgang til forskellig slags information.

Tryk og slip **Info** knappen en gang. Victor Reader vil liste alle de tilgængelige informationsemner, der findes i to sektioner: Aktuel position og Bog information

For at komme direkte til et bestemt afsnit så tryk og slip Info knappen, indtil du hører det ønskede afsnit.

4.1.1 Mulige tilgængelige emner

Bogtitel

Aktuelt sidenummer

Forløbet og resterende afspilletid

Antal bøger på CD.

Antal sider i den aktuelle bog, hvis muligt.

Total afspilletid for bogen.

Hvis du trykker og holder Info knappen, vil der yderligere blive oplyst om sprog for afspiller, om afspilleren kører på batteri eller lysnet, software version, model, antal brugernøgler og serienummer. Hvis afspilleren er sat op i begrænset tilstand, vil ordet "begrænset" blive annonceret efter model. Såfremt den er tilsluttet lysnettet, og batterierne endnu ikke er fuldt opladede, vil den resterende tid for opladningen blive oplyst.

4.2 Dvale tilstand:

Dvaletilstand gør det muligt for dig at programmere en tidsforsinkelse, inden enheden automatisk lukker ned.

Tryk **Info** knappen, indtil du hører "Dvale". Tryk **Venstre** eller **Højre** for at vælge den ønskede dvaletilstand. 15, 30, 45, 60 eller FRA (standard er Fra).

Når der er valgt en forsinkelse, vil Victor Reader annoncere forsinkelsen, inden den slukker. Ellers vil meddelelsen "Dvaletilstand fra" blive afspillet.

1 minut inden slut på en forsinkelse, vil meddelelsen "Resterende dvaletid 1 minut" blive afspillet. Inden der slukkes, vil meddelelsen "Dvaletilstand fra" blive afspillet, og afspilleren vil roligt lukke ned.

Bemærkning: Når der vælges *Begrænset brugerflade*, vil **Bogmærke** funktionen være deaktiveret, og **Bogmærke** knappen blive benyttet som **Dvale** knap. For at aktivere Dvaletilstanden trykkes Bogmærke knappen, og hvert efterfølgende tryk vil aktivere en 15, 30, 45 eller 60 minutters eller ingen forsinkelse, inden Victor Reader automatisk slukker.

4.3 Bogmærker

Bogmærke knappen indsætter bogmærker for at gemme vigtige sider for fremtidig reference.

4.3.1 Indsætte bogmærker

Tryk og hold **Bogmærke** knappen nede. Der tildeles et nummer til hvert bogmærke. Du vil høre en meddelelse, som bekræfter, at bogmærket er sat, samt nummeret på dette bogmærke.

4.3.2 Gå til et Bogmærke

Tryk og slip **Bogmærke** knappen. Når du hører meddelelsen "Bogmærke Liste", trykkes den **VENSTRE** eller **HØJRE** knap for at vælge den ønskede bogmærke. Dernæst trykkes **Start/stop** for at komme til det valgte bogmærke. Du vil høre nummeret på bogmærket, og Victor Reader vil starte afspillingen.

Bemærkning: *Bogmærkelisten indeholder altid et bogmærke for start henholdsvis slut på bogen. Bogmærker sorteres efter deres position i bogen, og ikke efter deres nummer.*

4.3.3 Slette bogmærker

Tryk og slip **Bogmærke** knappen to gange efter hinanden. Du vil så høre meddelelsen "Alle bogmærker i denne bog vil blive slettet. Bekræft venligst med Afspil/Stop knappen, eller annuller med en vilkårlig anden knap".

Bemærkning: *Bogmærker og aktuel position gemmes altid for hver bog for sig.*

4.4 Fortryd/Udfør igen funktioner

Bemærkning: Fortryd og Udfør igen funktionerne er deaktiveret, hvis dit bibliotek eller forhandler har konfigureret din afspiller for begrænset betjening.

Fortryd og Udfør igen funktionerne gør det muligt for dig at annullere og genoptage din sidste flytning.

Fortryd: Tryk og slip **Tilbagespoling** knappen for at annullere den sidste flytning.

Udfør igen: Tryk og slip **Fremadspoling** knappen for at genoptage den sidst annullere flytning.

Bemærkning: *Fortryd og Udfør igen funktionerne fungerer ikke overfor bogmærker. Hvis en Fortryd og Udfør igen handling forsøges, mens der ikke er noget at fortryde eller udføre igen, eller trykkes Fremadspoling eller Tilbagespoling, og Fortryd og Udfør igen er deaktiveret, høres en ugyldigt lydssignal.*

5. Lytte til en musik eller MP3 CD

Victor Reader er ikke kun en talende bog afspiller. Du kan også afspille standard audio CD'er og MP3 CD's, så du har mulighed for at lytte til din egen musik eller kommercielle MP3 bøger.

5.1 Funktioner

Navigering: **Venstre** og **Højre** benyttes til at skifte til forrige eller næste fil i samme mappe. Hvis den aktuelle fil er den første eller sidste i en mappe, vil **Venstre** og **Højre** knapperne skifte til den sidste eller første fil i den forrige henholdsvis næste mappe.

Afspilning: Afspilning er kontinuerlig, og ved slut på den aktuelle fil vil Victor Reader skifte til den næste fil, og vil stoppe ved slutningen af den sidste fil i fillisten.

Info knappen giver direkte adgang til forskellig slags information.

Antal filer og mapper

Total afspilletid

Forløbet tid

Resterende spilletid.

Antal bogmærker

Antal af bruger autorisationsnøgler

Batteri eller 220v

6. Fejlretning

6.1 Bognavigering

1. Hvorfor annoncerer Victor Reader ikke altid de samme DAISY niveauer, når jeg trykke knapperne Op og Ned?
Op og Ned knapperne løber igennem de DAISY navigeringsniveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Ikke alle DAISY bøger har samme navigeringsniveauer. For eksempel kan din bogproducent kun have indsat niveau 1 (ofte benyttet for kapitler) mærker i bogen. I dette tilfælde vil Op og Ned knapperne kun annoncere "niveau 1" og "frase". Et fraseniveau er altid inkluderet. Victor Reader kan kun navigere de niveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Ofte vil Gå til side funktionen ikke fungere, da mange bøger er produceret uden DAISY sidemærker. Et frasehop er heller ikke det samme for hver bog. Nogle producenter kan inkludere en frase markering for en enkelt sætning, mens andre kan have markeret fraser som et vilkårligt tidshop. Andre igen kan have konverteret gamle kasettebåndsbøger, og indsat frase som en hel side af en kassette. For bøger med få eller ingen DAISY navigeringsmærker, vil du blive nødt til at navigere med Fremadspoling og Tilbagespoling knapperne. Tilbagespoling er til venstre for **Start/stop** knappen, og Fremadspoling er til højre for **Start/stop** knappen.
2. Hvordan får jeg at vide hvilke DAISY navigeringsniveauer, der findes i min bog?
På Victor Reader løber Op og Ned knapperne igennem de mulige navigeringsniveauer i bogen. Mange bog producenter inkluderer i afsnittet i starten af bogen en beskrivelse af hvilke DAISY niveauer, der svarer til hvilken niveauer i bogen. Check efter med din bog producent, hvis du er usikker på bogens navigeringsfunktioner.
3. Hvor hurtigt kan jeg hoppe til start eller slut på en bog?
Victor Classic og Classic + har automatiske bogmærker for start og slut på bogen. Tryk **Bogmærke**, indtil du hører Victor Reader annoncere "Bogmærkeliste". Tryk derefter venstre pil, indtil du hører "start på bog". Starten på bogen er altid til venstre for det første brugerbogmærke. Tilsvarende for at komme til slut på bogen trykkes højre pil i bogmærkelisten, indtil du hører "slut på bog". Slut på bogen er altid til højre for det sidste bruger bogmærke. Hvis du ikke har sat noget bogmærke, skal du blot trykke venstre pil en gang i bogmærkelisten for at komme til start af bogen, eller trykke højre pil en gang for at komme til slut på bogen.

6.2 Batterier og opladning

1. Hvor lang tid tager det at oplade batterierne i Victor Reader, og hvor lang tid kan den spille?
Det tager 11 timer at lade afspilleren fuldt op. Afspilletiden for en fuld opladning er cirka 5 timer. Dette er baseret på kontinuerlig afspilning af DAISY bøger. Den forventede afspilningstid på 5 timer kan blive mindre som følge af:
Afspilleren er blevet ladet op i mindre end 11 timer.
Der udføres omfattende DAISY navigering. Dette medfører hyppigere brug af CD drevet, og forbruger således mere strøm.
Batterierne vil vare mindre end halvt så længe, eller omkring 2 timer, hvis der afspilles standard (type CD-DA) musik, eller bog CD'er.
Batterierne vil vare i cirka 3 timer, hvis der afspilles ikke DAISY MP3 musik eller bog CD'er.
Højere lydstyrke forbruger mere strøm.
Højere afspilningshastighed forbruger mere strøm.
Omgivelsestemperaturen kan påvirke levetiden for batterier.
2. Kan jeg oplade batterierne, mens jeg afspiller en bog?
Ja. Hvis du tilslutter Victor Reader til 220V, vil den oplade batterierne, også selvom du lytter til en bog.

3. Kan jeg ødelægge Victor Reader, hvis jeg ved et uheld sætter stikket til AC/DC laderen i det forkerte hul?
Nej.
4. Hvordan kan jeg få bekræftet, at jeg har tilsluttet AC/DC laderen korrekt?
Når du placerer afspilleren lige foran dig med håndtaget til venstre, er hullet til AC/DC laderen hullet længst væk fra dig på den højre side af afspilleren. Det er markeret med tre lodrette linier. Når du tilslutter AC/DC laderen, mens der er tændt for Victor Reader, vil du høre en kort klokkesignal. Dette bekræfter, at du er tilsluttet, og at batterierne lades op. Du kan også få bekræftet, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet, ved at trykke INFO knappen på Victor Classic eller knap 0 på Classic +, og lytte efter meddelelsen "strømkabel tilsluttet". Når Victor ikke er tilsluttet til 220 volt, vil disse Info knapper rapportere, at Victor arbejder på batterier. Hvis du kobler Victor fra 220 volt, mens der er tændt for den, vil du igen høre en kort klokkesignal, som bekræfter, at strømforsyningen er blevet afbrudt.
5. Kan jeg reducere effektiviteten af mine batterier ved at underlade eller overlade?
Nej. Victor Reader anvender højkvalitets NiMH (Nickel Metal Hybride) genopladelige batterier, som ikke har nogen kemisk hukommelse på samme måde som Nickel Cadmium batterier. NiMH batterierne forudsætter ikke noget specifikt ladningsforløb, og vil ikke blive mindre effektive ved underladning eller overladning.
6. Kan jeg beskadige mine batterier, hvis jeg efterlader strømkablet tilsluttet i for lang tid?
Nej. Men hvis du ikke skal bruge Victor Reader i længere tid, for eksempel mens du er på ferie, er det bedst at tage den ud af stikkontakten.
7. Kan jeg erstatte mine batterier?
Nej. Af sikkerhedsmæssige årsager er batterikassen forseglet, og må kun åbnes af HumanWare eller en autoriseret forhandler.
8. Hvor mange gange kan jeg genoplade mine batterier, inden de skal skiftes ud?
Batterierne er beregnet til 500 opladning/afladningsforløb. Derefter kan de stadig genoplades, men deres evne til at holde på en opladning vil formindskes. Når batteriet ikke længere kan holde på en opladning, bør det skiftes ud.

6.3 CD'er

1. Hvad skal jeg gøre, hvis min CD'er blive siddende i, og ikke vil komme ud?
For det første sluk for din Victor Reader. Tænd dernæst for den igen, og tryk efterfølgende på eject knappen. Hvis Tænd/Sluk knappen ikke synes at fungere (der kommer ikke noget lydsignal, når du trykker den), så hold Tænd/Sluk knappen nede for 10 sekunder, hvorefter den slippes. Hold dernæst eject knappen nede, mens du igen trykker på Tænd/Sluk knappen. Fortsæt med at holde eject knappen nede, indtil du hører "Velkommen til Victor". Victor Reader bør derefter skubbe CD'eren ud.
2. Kan jeg skade min Victor Reader, hvis jeg sætter CD'eren omvendt i?
Nej. Victor Reader vil blot skubbe CD'eren ud.
3. Hvorfor laver min Victor Reader pivende eller kvidrende lyde med et par minutters mellemrum?
Dette er den normale lyd fra et CDROM drev, når afspilleren læser information fra CD'eren. For DAISY CD bøger vil CD'en 15 sekunder efter at den er læst færdigt, spinne ned for at spare strøm, og være stille for et minut eller to, indtil der igen bliver behov for læsning. Trykkes der på navigeringsknapper, eller hoppes der til et bogmærke, vil CD'eren spinne op for at blive placeret ved den nye position.
4. Hvad skal jeg gøre, hvis min CD springer over eller stopper afspilningen?
Dårlig kvalitets CD'er eller CD'er med fingeraftryk eller ridser vil ofte ikke kunne afspilles korrekt, eller slet ikke kunne afspilles. Skub CD'en ud. Prøv at rense den ved en blød klud uden bomuld, eller med en CD rensklud, som kan købes i de fleste forretninger, som sælger CD'er. Benyt ikke papirshåndklæde eller papirsservietter. Hvis CD'eren stadig ikke vil spille, bør den undersøges for ridser. Ridsede CD'ere bør returneres for ombytning.

5. Behøver jeg at rense CD drevet eller laser læselinsen?
Nej. Det drevtype, som anvendes i Victor afspillerne, behøver ingen rengøring.
6. Kan jeg anbringe Braille eller anden form for etikette på CD'eren?
Nej. Etiketten kan være skadelig for balancen af CD'eren, når den spinner ved høje hastigheder. Hvis også etiketten river sig løs inden i afspilleren, er det meget sandsynligt, at CD-ROM drevet ødelægges. Hvis du modtager en CD med en Braille eller anden form for ikke producent etikette, bør du fjerne den.
7. Hvorfor vil jeg af og til høre meddelelsen "Vent venligst", når jeg trykker en knap, selvom der er indsat en CD?
Dette kan ske, hvis du trykker en knap for hurtigt efter at have indsat CD'en, eller tændt for afspilleren. Victor Reader skal bruge lidt tid til at skanne disken, og til at indlæse DAISY navigeringsinformationen. Efter at have tændt for din afspiller eller efter at have indsat en CD'er, skal du vente, indtil Victor Reader annoncerer titlen på bogen, inden du trykker en knap.
8. Hvad betyder meddelelsen "dårlig disk"?
Dette er meddelelsen, Victor Reader sender ud, hvis den ikke kan læse informationen på Cd'en. Vær sikker på, at CD'en er sat ind med afspillesiden vendende nedad, og at den ikke har noget fingeraftryk eller ridser.
9. Hvad betyder meddelelsen "Ingen bog på disk"?
Dette er meddelelsen, som Victor Reader sender ud, hvis den ikke genkender typen af CD'en. Victor Reader kan kun afspille DAISY, MP3 eller audio CD'er.
10. Hvad betyder meddelelsen "Audio format ikke understøttet"?
CD'en indeholder audio filer, som Victor Reader genkender, men filerne er formateret på en måde, som er inkompatibel med Victor Reader softwaren. Du bør henlede HumanWare's tekniske support om dette.
11. Kan jeg beskadige min Victor Reader ved at afspille en ridset CD'er?
Nej. CD'ens læselinse kommer ikke i kontakt med CD'ens overflade, så den vil ikke blive beskadiget, hvis CD'en er ridset. Den vil heller ikke være udsat for slid fra gentagne afspilninger på samme måde som en kasettebåndsafspiller.

6.4 Generelt

1. Hvad skal jeg gøre, hvis Tænd/Sluk knappen ikke fungerer?
Hvis du ikke hører noget lydsignal, når du trykker Tænd/Sluk knappen, så vær først sikker på, at afspilleren er tilsluttet 220 volt. Hvis Tænd/Sluk knappen stadig ikke fungerer, så tryk og hold den nede for 10 sekunder. Dette vil nulstille strømforsyningen. Tryk derefter knappen igen, og Victor Reader bør give et lydsignal og starte normalt.
2. Kan softwaren i Victor Reader opdateres?
Ja. Når HumanWare opgraderer Classic softwaren, vil brugeren selv være i stand til at installere den nye software ved blot at indsætte en speciel opgraderings CD'er i afspilleren, som derefter automatisk opdaterer den interne software. Opgraderings CD'eren kan fåes fra HumanWare Customer support, hentes direkte fra HumanWare webside, eller fra en forhandler, som yder denne support.
3. Bør jeg slette bogmærker for at spare på hukommelsen?
Nej, Victor Reader kan gemme mere en 1500 bogmærker, fordelt over mange bøger. Selvom du overskrider dette store antal, vil Victor Reader blot genbruge de bogmærker, som er benyttet mindst. Så du behøver ikke at slette bogmærker, du ikke har brug for.
4. Hvorfor fungerer lydstyrkekontrollen ikke overfor mine hovedtelefoner?
Vær sikker på, at hovertelefonerne er tilsluttet stikket for hovedtelefon, og ikke linieudgangen. Lydstyrkekontrollen fungerer kun overfor stikket til hovedtelefon. Dette er stikket nærmest mod dig på højre side af afspilleren. Linieudgangen er for tilslutning af anden enhed såsom et lydanlæg eller båndoptager.

7. Tekniske specifikationer

- Dimensioner: 22,8 X 22,8 X 7cm (9 X 9 X 6,99 cm.)
- Vægt : 1.4 kg (3 lbs) uden batterier
1.6 kg (3,5 lbs) med batterier
- Understøttede filformater: Daisy 1.0 og 1.1
Daisy 2.0 og 2.0.2
Daisy NISO Z39.86 2002
- Batteritype: Ni-MH
- Ladetid: 11 timer
- Batteritid: 5 timer for MP3 (Daisy bog)
- Strømforsyning: Den medfølgende AC/DC strømforsyning opfylder kravene kun for det land, hvor den blev solgt. Check din forhandler for andre AC/DC ladere til brug for andre lande.
- Kodningsalgoritmer: PCM, ADPCM, MPEG, MP3, OGG (Ogg Vorbis)
- Stik til fodkontakt 2,5 mm
- Strømsstik 1,3 mm
- Stik for linieudgang 3.5 mm
- Hovedtelefonstik 3.5 mm

For yderligere information kontakt venligst HumanWare:

Hovedkontor
445, du Parc Industriel
Longueuil (Quebec)
Canada J4H 3V7

Service
1030, René-Lévesque Blvd.
Drummondville, Québec
Canada J2C 5W4

Telefon: 1 (819) 471-4818
Gratis nummer (Canada & USA): 1 (888) 723-7273
Fax: 1 (819) 471-4828
E-mail:
Web: www.humanware.ca