

Zebra Rollator

Brugervejledning



Kontakt:

**Mobilex A/S
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danmark**

Zebra Rollator Indholdsfortegnelse.....	2
1 Zebra Rollator Indledning.....	3
2 Zebra Rollator Sikkerhedsvejledning.....	4
2.1 Anvendte symboler.....	4
2.2 Sikkerhed – generelle henvisninger.....	4
3 Zebra Rollator Formålsbestemmelse	5
4 Zebra Rollator Anvendelse.....	5
5 Zebra Rollator Konformitetserklæring.....	6
6 Zebra Rollator Produktopbygning.....	7
6.1 Produktopbygning / Produktbeskrivelse.....	7
7 Zebra Rollator Leveringsbeskrivelse.....	7
8 Zebra Rollator Anvendelsevejledning.....	7
9 Zebra Rollator Transportvejledning.....	8
10 Zebra Rollator Tekniske data.....	8
11 Zebra Rollator Typeskilt.....	8
12 Zebra Rollator Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.....	8
13 Zebra Rollator Vedligeholdelse.....	9
14 Zebra Rollator Bortskaffelse.....	9
15 Zebra Rollator Garantierklæring.....	10
16 Zebra Rollator Egne notitser.....	10

Den efterfølgende brugervejledning giver Dem beskrivelser til betjening og vedligeholdelse af Zebra Rollatorer.

Ved spørgsmål er de velkommen til at henvende Dem ved:

Mobilex A/S

Nørskovvej 1

8660 Skanderborg

Danmark

Telefon: +45 87932220

Telefax: +45 87931777

E-mail .: info@mobilex-care.com

2.1 Anvendte symboler

I brugervejledningen anvendes følgende symboler.

Advarsel

Disse symboler kendetegner sikkerhedshenvisninger, der kan medføre fare, hvis de ikke følges.

Henvisning

Under dette symbol finder de vejledning til anvendelse af rollatoren.

2.2 Sikkerhed – generelle henvisninger.

Sørg for at alle personer, der anvender rollatoren læser dette. Skader, der opstår, fordi henvisningerne ikke er fulgt, vil ikke blive accepteret som leverandøransvar.

Indskrænkninger i anvendelsen

- Zebra rollatoren må ikke belastes med mere end 120 kg.
- Indkøbskurven må ikke belastes med mere end 7 kg.
- Bakken må kun anvendes til lette genstande.
- Man må ikke transportere personer på sædet.

Uheldsfare

- Benyt kun rollatoren til det formål, den er beregnet til.
- Anvend kun rollatoren i teknisk perfekt tilstand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer uden skriftlig tilladelse fra leverandøren.
- Ved alle rollatorens led er der forhøjet risiko for klemskader.
- Check bremsefunktionen før anvendelse.
- Benyt kun rollatoren i fuldt udklappet tilstand. Kontroller at klappmekanismen er i fastlåst tilstand.
- Benyt kun rollatoren på fast, jævn undergrund.
- Benyt kun sædet på rollatoren med bremserne låst.
- Bremserne skal altid bremses på samme tid.

3 Zebra Rollator **Formålsbestemmelse**

Zebra rollatoren er beregnet til at blive anvendt såvel ude som inde. Den skal afhjælpe gangbesvær og manglende balance og øge brugerens bevægelsesfrihed. Rollatoren må kun bruges af én person.

4 Zebra Rollator **Anvendelse**

Zebra rollatoren anvendes til personer, der har brug for støtte ved gang.

Producent:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danmark

Erklærer hermed at produktet: Zebra Rollator

er produceret i henhold til den tekniske dokumentation, og opfylder de grundlæggende krav beskrevet i:

- Retningslinjer 93/42/EWG for Medicinske produkter, tillæg I fra 14 Juni 1993
- DIN EN ISO 11199-2 (2003-04) Gåhjælpemidler for to-armsbetjening – krav og testmetoder – Del 2: Rollatorer

Ansvarlig:

Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

Stilling: Adm. Direktør

Navn: Lars Nygaard

Skanderborg 10/3-2005

Dato




Underskrift

6 Zebra Rollator

Produktopbygning

6.1 Produktopbygning / Produktbeskrivelse

Zebra Rollatoren er fremstillet af aluminium.

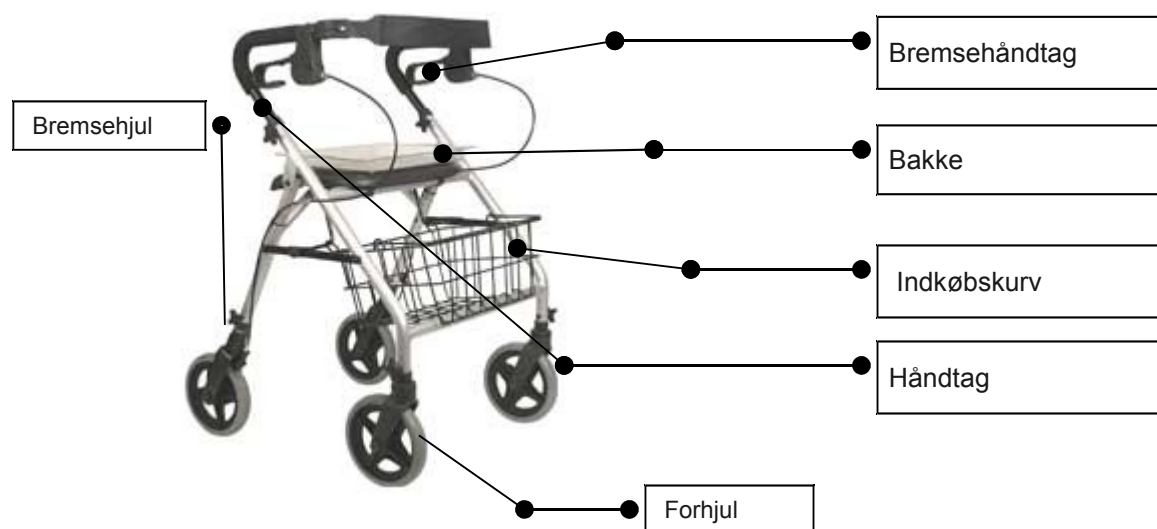

7 Zebra Rollator

Leveringsbeskrivelse

Zebra rollatoren leveres i een karton.

Indholdet består af:

- 1 rollator
- 1 bakke
- 1 indkøbskurv
- 1 par håndtag med rygstøtte
- 2 håndskruer
- 1 brugervejledning

Håndtagene med rygstøtten skal monteres med de medfølgende håndskruer. Derefter monteres indkøbskurven og bakken.

8 Zebra Rollator

Anvendelsevejledning



Ved at klappe rollatoren sammen, kan der spares plads f.ex ved transport.

Håndtagene kan indstilles, så den passer til kropsbygningen.

Sædet kan anvendes, når der er brug for en pause.

9 Zebra Rollator

Transportvejledning

Tag kurven og bakken væk og fold rollatoren sammen.

10 Zebra Rollator

Tekniske data

Zebra Rollator	
Max. belastning :	120 kg
Vægt med tilbehør / uden tilbehør	7,7 kg / 6.8 kg
Længde:	65 - 76 cm
Bredde:	55,5 cm
Højde:	83,5 – 98 cm
Mål foldet sammen (LxBxH):	32 cm x 57 cm x 89 cm
Type bremse	2 x låsbar håndbremse
Venderadius	120 cm
Vinkel mellem linie gennem håndgrebene og bevægelsesretningen.	0° (parallel)

11 Zebra Rollator

Typeskilt

Typeskiltet og serienummerskiltet befinder sig på tværstangen på forrammen.

Afbildning af Typeskiltet:



12 Zebra Rollator

Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning

- Ved rengøring bør der ikke anvendes skarpkantede værktøjer eller aggressive opløsningsmidler. Højtryksrenser må heller ikke anvendes.
- Større urenheder kan fjernes med neutrale rengøringsmidler.
- Lette urenheder kan fjernes med en fugtig klud.

13 Zebra Rollator

Vedligeholdelse

Zebra rollatoren er generel vedligeholdelsesfri, men skal dog en gang per år checkes af en fagmand. Hvis der under brug forekommer mangler, som f.ex manglende bremsevirkning, må rollatoren ikke længere anvendes før reparation har fundet sted.

Det årlige check skal indeholde:

Visuelt check af alle dele for at konstatere evt. bøjning af stel, beskadigelse, slitage eller korrosion:

- Rollatorstel
- Håndtag
- Håndgreb
- Bremsehåndtag
- Bremsekabler
- Hjulgafler
- Hjul
- Bremses
- Sædet
- Indkøbskurv
- Bakke

Alle skruer, møtrikker skal kontrolleres for at sikre at de er korrekt fastgjort.

Bremsens funktion afprøves:

- Opbremsning af rollator
- Fatsgørelse af bremsehåndtag

14 Zebra Rollator

Bortskaffelse

Rollatoren skal afleveres på kommunal genbrugsplads.

15 Zebra Rollator

Garantierklæring

Producenten giver 1 års garanti ved produktionsfejl, samt 2 års reklamationsret iht. købeloven. Garanti og reklamationsret bortfalder ved fejlagtig anvendelse af rollatoren.

16 Zebra Rollator

Egne notitser
