



PM 171

Fejlfinding:

LowPressure. Lavt tryk. Hvis der er et gult lys ved dette symbol og der lyder en alarm, så er trykket for lavt i madrassen.

Tjek følgende: Er CPR ventilerne i madrassen lukkede, ellers lukkes de. (CPR sidder i hovedenden)
Er slangerne korrekt koblet på pumpen. Der skal lyde et lille klik.
Er en af cellerne i madrassen gået af luftslangerne, så kobles den på igen.

Power Failure. Strømsvigt. Hvis der er et gult lys ved dette symbol og der lyder en alarm, så er der slukket for strømmen.

Tjek følgende: Er det korrekt at strømmen slukkes, så tryk på **ALARM MUTE** og tag stikket ud.
Er det en fejl, så tænd for strømmen og tryk på **POWER**, så starter pumpen igen, og den husker sidste indstilling.

SERVICE. Hvis den lyser og alarm lyder, Kontakt depotet.

PM 171. HMI NR. 64225

FORHANDLER: Zibo A/S

Tlf 76900407. www.zibo.dk

Rengøring: Betræk afmonteres og vaskes ved Max 90°C. Kan tørretumbles.
Pumpe og slanger aftørres med egnet rengøringsmiddel.
Når alt er tørt kan det samles og Lægges på depot.