

Domus Auto - Helmadras

Dynamisk trykaflastende helimadras

Domus Auto er en fleksibel, trykaflastende vekseltryksmadras med mange indstillingsmuligheder, som også giver mulighed for at aflaste tryk ved hælene med indstilling af O-tryk.



Udfordring: For både patienter og plejepersonale er vendinger og forflytninger en udfordring, som kræver ekstra tid og går ud over velvære og arbejdsmiljø. En Domus Auto vekseltryksmadras er en del af løsningen.

Egenskaber

Domus Auto vekseltryksmadras består af 17 enkelte luftceller, der hver er 20 cm høje. Alle celler kan udskiftes enkeltvis.

Brugertilpasset tryk

Madrassen indstiller automatisk trykket i madrassen efter brugerens vægt, og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk, og det er muligt at indstille siddefunktion.

Hælfunktion

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der dannes O-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

Autofirmfunktion

Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang.

Åndbart og strækbart betræk

Betrækket er strækbart og åndbart. Det fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen. Alle syninger i betrækket er svejsede for at sikre optimal hygiejne.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.

Domus Auto - Helmadras

Dynamisk trykaflastende helmadrass

Domus Auto er en fleksibel, trykaflastende vekseltryksmadras med mange indstillingsmuligheder, som også giver mulighed for at aflaste tryk ved hælene med indstilling af O-tryk.



Autofirmfunktion

Autofirm slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang.

Brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstilles automatisk efter brugerens vægt, og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket.

Betræk

Betrækket er strækbart og fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen. Materialet er semipermeabelt, så huden kan ånde.

CPR-funktion

Madrassen har CPR-funktion.

Tekniske data

Helmadras

80x200x20 cm

REF: MDYF1280
HMI nr.: 119740

83x200x20 cm

REF: MDYF1283
HMI nr.: 139544

85x200x20 cm

REF: MDYF1285
HMI nr.: 119743

88x200x20 cm

REF: MDYF1288
HMI nr.: 139547

90x200x20 cm

REF: MDYF1290
HMI nr.: 119746

Betræk: Åndbart, inkontinens- og brandhæmmende PU-betræk der er strækbart i alle retninger. Integreret ledningsophæng.

Sårkategori: Dækker til og med sårkategori 4 og forebyggelse af meget høj risiko.

Brugervægt: 30-250 kg

Max belastningsvægt: 300 kg.

Madrasvægt: 5,6 kg

Sammensætning: 20 celler

Materiale: Betræk: Nylon/PU, lilla Celler: Nylon/PU, lilla Bundstykke: PU/nylon, mørkegråt

Rengøring: Betrækket kan vaskes ved max. 90° C.

Topbetejnt pumpe

Terapi: Dynamisk, Statisk, Maxfirm, Seat inflate.

Lydsvag – under 28 dB(a)6 komfortniveauer

Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømudfald.

Elektricitet: AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

Cyklustid: 10 min.

Dimensioner: H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm

Pumpevægt: 2,3 kg

Rengøring: Desinficeres med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler på en opvredet klud.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.