

Symbolforklaring



Justering af tryk

- Madrassen justerer sig automatisk ind efter patientens vægt og fordeler trykket derefter.
- LED-lys, der blinker fra venstre mod højre, viser, at processen kører.
- Venstre LED-lampe, der lyser permanent ✓, viser, at processen er afsluttet.



Alarm mute & panel-lås

- Midlertidig slukket alarm. Genoptages, hvis situationen ikke er løst efter 5 minutter.
- Tryk 3 sekunder for at låse kontrol-panelet op eller låse det. Låser automatisk, når den ikke er i brug i 5 minutter.



Tuning

- Finjustering af det forudindstillede tryk for individuelt tilpasset komfort
- 3 tuning-niveauer:
0 Auto = justeret forudindstillet tryk
- Madrassen bliver en smule blødere
+ Madrassen bliver en smule fastere



Therapy

Pumpen indstiller sig automatisk ved opstart på den sidst indstillede terapi-tilstand. For at vælge ny terapi-tilstand trykkes hurtigt (mindre end 1 sekund) på . Ved pause på mere end 1 sekund ved en terapi-tilstand vil pumpen registrere denne som "indstillet".



MaxFirm

Pumpen starter automatisk i MaxFirm, når den tændes første gang. Efter ca. 20 minutter skifter pumpen automatisk til vekslende tilstand og systemet er nu klar til brug. Hvis pumpen slukkes, mens den er i en af terapifunktionerne, vil pumpen starte i MaxFirm tilstand, når den tændes igen. Når systemet igen er klar til brug skifter pumpen automatisk til den sidst valgte terapifunktion. Under patientforflytninger/sygepleje procedurer kan med fordel benyttes MaxFirm som terapi-tilstand for at opnå bedre støtte. Denne tilstand varer i ca. 20 minutter, hvorefter pumpen automatisk vender tilbage til den tidligere indstilling. Vælger man MaxFirm 2 gange i træk efter hinanden forbliver pumpen i MaxFirm.

OBS! Importøren anbefaler at når plejepersonalet forlader patienten efter brug af MaxFirm terapi-funktionen, stilles pumpen tilbage til den korrekte terapifunktion.



Statisk

Rolig madras med det samme lave tryk i alle celler.



Vekseltryk/skiftende

Veksler mellem fyldte og tømte celler på hver 2. celle; hver 10. minut: dette modus er til forebyggelse og behandling af tryksår ved patienter i høj risiko.



Sædeoppustning

Ekstra støtte til patienter i den siddende stilling. Afvent 2 min. i liggende stilling før hovedstøtten hæves.

Alarm guide



Lavt tryk	LED-lys viser for lavt tryk	     
Årsag	• Løs CPR/HLR-rem • Beskadiget luftcelle • Problem med slangemontering	
Løsning	• Stram CPR/HLR-komponenten • Kontroller for eventuel lækage i madrassen • Kontroller og tilslut slangerne igen	
Strømsvigt	LED-lys viser for strømafbrydelse	     
Årsag	• Ingen strømforsyning • Sikring brændt af • Fejl på printkort	
Løsning	• Tjek ledninger og strøm-input • Udskift sikring • Udskift printkort (skal foretages af trænet personale)	
Service Tid til serviceeftersyn	En grøn lampe lyser ud for servicesymbolet	     
Årsag	Mekanisk fejl som kræver service	
Løsning	Kontakt dit depot eller din leverandør	

Nødsituation Hjertestop, CPR	Træk hurtigt i CPR-mærket, som er placeret ved hovedenden af madrassen på patientens højre side.	
Løsning	CPR/HLR-remmen udløses for hurtig tømning af luft i madrassen. Frakobl forbindelsen fra pumpeenheten for at fremskynde deflationen.	