

Quick Guide

OPUS 1-085EW | OPUS 1-090EW | OPUS 1-120EW | OPUS 1-K85EW

 Se Brugsanvisningen for uddybende info om de enkelte funktioner.

HÅNDBETJENING


DEN GRØNNE KNAK

Håndbetjeningens grønne knap er forprogrammeret, således at lår- og rygdæl kører samtidigt:

Op: Lårdel kører helt op, derefter rygdæl.

Ned: Rygdæl kører helt ned, derefter lårdel.

Alle sengens funktioner stopper automatisk, når knapperne slippes.

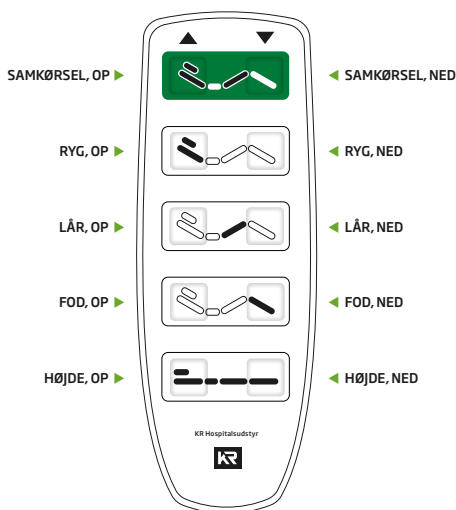

HJULPOSITIONER

VANDRET = HJULENE ER FRI



NEUTRAL

Hjulene er frie og bevægelige i alle retninger

RØD PEDAL NED = HJULENE ER BREMSET



LÅST

Hjulene er låst og sengen står fast.

GRØN PEDAL NED I FODENDE = RETNINGSSTYR ER AKTIVERET



RETNINGSSTYR

Bremser er frigjort og hjulene i fodenden låser i køreretningen.

Sengen er udstyret med fire drejelige hjul, retningsstyr og centralbremse-system, der kan betjenes på begge sider af sengen. Aktiveres en pedal, reagerer alle hjul.



Sengens bremses skal altid aktiveres, når sengen ikke skal flyttes, for at undgå ulykker.

GALGE

Galgen monteres i en af holderne i hovedenden. Galgen må kun bruges inden for sengerammen.



MAX. BELASTNING:
75 kg

SENGEHEST

Der findes to typer sengeheste, en brugerbetjent og en personalebetjent i tre højder. Begge monteres, uden brug af værktøj, vha. en styretap og to snaplåse omkring sengens overramme.



Pas på ikke at klemme fingrene, når sengehesten lægges ned. Grib kun fat om overrøret.



Aktiver udløseren og læg sengehesten ned. Modsat løftes sengehesten til den klikker sig på plads igen.

MADRASMÅL

		Std. sengehest	Std. sengehest	Høj sengehest A	Høj sengehest B
		Personalebetjent: 158550H+158550V 158550KH+158550KV	Brugerbetjent: 158548H+158548V	Personalebetjent: 158547H+158547V 158547KH+158547KV Brugerbetjent: 158549H+158549V	Personalebetjent: 158551H+158551V Brugerbetjent: 158552H+158552V
OPUS 1	Madras B/L	Madrashøjde	Madrashøjde	Madrashøjde	Madrashøjde
-K85EW	83-85/180 cm	10-16 cm	—	17-23 cm (kun personalebetjent)	—
-085EW	83-85/200 cm	10-16 cm	12-18 cm	17-23 cm	19-25 cm
-090EW	88-90/200 cm	10-16 cm	12-18 cm	17-23 cm	19-25 cm
-120EW	118-120/200 cm	10-16 cm	12-18 cm	17-23 cm	19-25 cm

DELING AF SENG

Ved transport og opbevaring kan OPUS 1EW deles i 4-6 dele. Hvis du deler sengen i 6 dele, vejer ingen af delene over 25 kg ved OPUS 1-085EW, -090EW og -K85EW.



Se Brugsanvisningen.




LIGGEFLADEFORLÆNGER

Sengen leveres med indbygget liggeflade forlænger. Liggefladen kan forlænges fra 200 til 220 cm og ved OPUS 1-K85EW fra 180 til 200 cm.

1. Løsn fingerskruerne under sengesiderne i begge ender.
2. Træk gavlenderne ud til stop og spænd fingerskruerne.
3. Løsn fingerskruerne under madrasbøjlen i fodenden.
4. Træk madrasbøjlen ud til stop og spænd den fast.



Juster altid madrasstyret i fodenden, så der er mere end 25 mm afstand ud til gavlen.

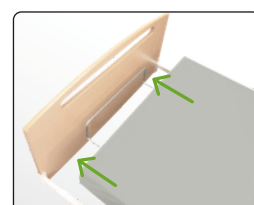

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Herunder mulige farer og anvisninger på at undgå dem:

-  Læs **ALTID** brugsanvisningen og følg dens anvisninger nøje.
-  Personalet skal **ALTID** risikovurdere, om brugeren kan anvende sengen korrekt og sikkert.

KLEMFARE

- Pas på, at ingen kommer i klemme, når sengen betjenes. Der er klemfare mellem sengens bevægelige dele.
- Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningen.
- Vær agtpågivende, når sengen sænkes fra hævet position. Kravl aldrig ind under sengen.
- Vær opmærksom på klemfaren ved utilsigtet aktivering af funktionsknapper, pedaler, sengeheste mm.

FALD FRA SENGEN

- Efterlad ikke brugeren i sengen i højeste position.
- Sænk altid sengen før udstigning.
- Brug sengeheste.
- Lås altid hjulene efter transport.
- Kravl ikke over gavle og sengeheste for at komme ud af sengen.
- Kontroller at hjulene er låst før forflytning.

VÆLTERISIKO

- Transporter aldrig sengen i højeste position, på skrånende eller ujævnt underlag.

FEJLBETJENING

- Overlad kun håndbetjeningen til personer, som du ved, kan bruge sengen og dens funktioner.

EL-SIKKERHED

- Sengen må kun tilsluttes forsyningsnet 230VAC.
- Kontroller, at sengen og andet elektrisk udstyr ikke påvirker hinanden, men fungerer efter hensigten.
- Sørg for, at ledninger o.l. ikke kommer i klemme ved anvendelse af andet elektrisk udstyr i eller ved sengen.
- Hæng håndbetjeningen på sengen, når den ikke anvendes, så den og dens ledning ikke ødelægges af slag eller stød, tabes på gulvet eller kommer i klemme.
- Kør ikke over ledninger med sengen.
- Hvis sengen ikke fungerer optimalt eller der er synlige skader på elektriske dele, kontakt teknisk personale.



Se Brugsanvisningen for mere info.



ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER



Sengen er specielt velegnet til plejehjem og hjemmeplejen.

Sengen er kun beregnet til voksne brugere med en fysisk størrelse på:



- HØJDE:** Min./max. 146/195 cm (forlænget = 215 cm).
Bemærk v. K85EW: Min./max. 146/175 cm (forlænget = 195 cm).
VÆGT: 40 kg eller mere, dog max. 165 kg v. SKI-kunder* og ellers 200 kg.
BMI: Body Mass Index på 17 eller mere.

-  Max. belastning må **IKKE** overskrides (Safe Working Load/SWL = 250 kg).
-  Overhold sengens max. tider i forhold til aktivering og pauser. Driftsfrekvens (10%): Max. 2 min. ON / 18 min. OFF.
-  Personer med fysiske eller psykiske begrænsninger må ikke anvende sengens elektriske funktioner uden opsyn, medmindre personalet, efter risikovurdering, tillader det og brugeren har fået grundig oplæring.

Specifikt SKI*

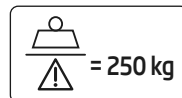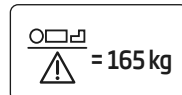

Andre

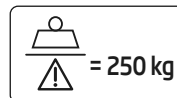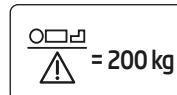

MANUEL RENGØRING VED BRUGER

Følgende aftørres med almindelige rengøringsmidler og en opvredet fugtig klud:

- Synlig snavs.
- Flader, der er i kontakt med brugeren, såsom håndbetjening, sengeheste og gavle.
- Områder, hvor støv og skidt naturligt samler sig.

Aftørrede områder tørres efter med en tør og ren klud.

De rengøringsmidler, der benyttes må ikke:

- Være stærkt alkaliske.
- Indeholde ætsende præparater.
- Ændre sengens overfladestruktur eller plastikkens klæbeevne.
- Være fedtnedbrydende.

Sengen kan desinficeres med alkohol og produkter med lav koncentration af klor.

-  Ved rengøring af sengen skal fabrikantens rengøringsanvisning følges!
-  Se Rengøringsvejledningen for mere info.

MANUEL RENGØRING INDEN NY BRUGER



Se Rengøringsvejledningen.

VASK I ANLÆG

Sengen kan vaskes i anlæg.



Se Rengøringsvejledningen.

SERVICE

Serviceeftersyn anbefales mindst én gang årligt.
Brug ikke sengen hvis den er i stykker.



Se Servicevejledningen
for mere info.



ANBEFALET
SERVICEEFTERSYN:
1XÅRLIGT

* Dette gælder specifikt kunder på SKI-udbudsaf-talen.